



图片仅供参考，请以产品实物为准

# 隐形眼镜(美瞳)超声波清洁盒

Ultrasonic Contact Lenses Cleaning Box

## 使用指南

JP-336 轻洁盟

## 隐形眼镜超声波清洗机

- 感谢您购买此产品。
- 为了正确安全使用，请在使用前务必仔细阅读使用说明书。
- 请妥善保管此说明书以免丢失。

### 产品简介

传统的隐形眼镜清洗均采用功能水浸泡并利用功能水的逐步溶解蛋白能力，以清除附着在隐形眼镜表面的蛋白沉淀，达到清洗隐形眼镜的目的，但这个过程通常需要6-8时以上。

JP-336隐形眼镜超声波清洗机，利用超声波清洗原理，并采用高频（58KHz）搭配护理液可以在3分钟内清除蛋白沉淀，并可有效保护镜片。经它清洗后，可以更好地护您的眼睛。

JP-336产品外观小巧轻便，简约大方，内置3.7 1500mAh的可充电锂电池，方便使用者携带。操作简单，方便添加和清除清洗液。



为了避免火灾，电击，人身伤害，请务必遵守以下要求：其它请遵循国家和地方的有关电气法规。

产品充电完成后请拔掉电源。

产品不具备防水功能。

请将产品放在安全的地方，防止掉入水中或其它液体中。

当产品掉入水中，请立即取出产品，拔掉电源，沥干产品。

当受到电磁干扰时，可能会引起产品被关机或不能被关机，如有发生，请按照《使用指南》重新操作即可。

请按《使用指南》正确使用产品，切勿私自使用配件或使用厂家未曾建议的配件。

请勿使用插线或已损坏的AC电源转换器，若产品不能正常工作、损坏，请将损坏的产品拿到指定的维修点进行检修。

在无人照看时，请勿将产品插上电源。

此产品不能给小孩当玩具，请将产品放置在小孩不能碰及到的地方。

产品远离热源，并放置于干燥、平坦的表面。

## 产品技术参数

项目	参数
型 号	JP-336
容 量	3ml
电 源	5V===1000mA
功 率	3W
清洗时间	3分钟
超声波频率	58KHz
内槽尺寸	直径19mm 高度10.5mm
整机尺寸	90 × 81 × 23.8mm
净重 / 毛重	114g / 245g

## 清洗原理

利用其波形在液体介质中传播使液体空化，产生真空泡，真空泡的内外产生很大的压力，真空泡越大压力就越大，其破裂时产生的冲击力就越大，破坏力就会越高。根据不同的物件我们会选择不同的超声频率，既有清洗的效果又不损伤物件本身，如果加入化学药剂则超声可以加快化学反应速度，提高清洗效率！


## 除污过程



水在超声波的作用下，会产生许多微小的真空泡。



在超声波的作用下，真空泡会不断地“爆炸”冲击物体表面的污垢。

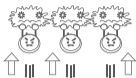

污垢分裂成小颗粒状并脱离物体表面，进入水中。


## 显微镜下清晰效果对比图



清洗前的隐形眼镜



清洗后的隐形眼镜

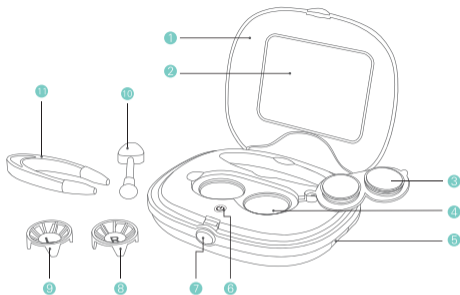

清洗篮等附件随机发货，可能会因生产批次不同而不同，请以实物为准

- |         |               |        |
|---------|---------------|--------|
| ① 上盖    | ⑤ USB充电口      | ⑨ 左清洗篮 |
| ② 镜子    | ⑥ 触摸开关（内有指示灯） |        |
| ③ 橡胶塞   | ⑦ 上盖开关        | ⑩ 吸盘   |
| ④ 不锈钢内胆 | ⑧ 右清洗篮        | ⑪ 镊子   |



- ① 在清洗的过程中，清洗机中发出的轻微的“滋滋”声音，表示清洗正在进行，属正常现象。
- ② 3分钟清洗建议每天早中晚各一次即可。



先洗净双手，然后用温开水或纯净水洗净内胆和篮子。用吸盘拿出隐形眼镜。



把篮子放入清洗机中，将隐形眼镜的护理液（不建议水或者纯净水）装入清洗机不锈钢槽的边缘，不要装太满。



用镊子将左眼镜片放在“L”标记的清洗篮上，同样用镊子将右眼镜片放入“R”标记的清洗篮上。



触摸开关，机器开始工作，绿色指示灯亮，3分钟后，清洗结束。



用镊子取出隐形眼镜镜片，倒出清洗液，冲洗干净篮子，将机器放置于干燥的地方。



## 使用警告



除功能水、生理盐水及纯净水外，不得在清洗槽中加入其它非餐具类使用的化学药剂。



槽内加护理液适量，避免护理液溢出槽外。



避免产品无清洗液时长时间空烧，否则会损坏产品。



为保持清洗槽清洁、防止交叉感染、更好地保护眼睛，此机器建议只清洗个人隐形眼镜。



禁止用水清洗整个产品，以防发生漏电或损坏机器。




若清洗机未能正常工作，禁止继续操作，非专业人员请勿轻易拆装产品。

#### 电量与充电



开机后,电量低时红灯闪烁，机器不能工作。

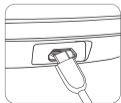


连接电源充电线，为机器充电，充电时绿灯闪烁，充满绿灯常亮。



清洗完成后，倒空内槽，也可以用该清洗机暂存放隐形眼镜。



用干净的布或绢纱擦干清洗机不锈钢内槽及机身。

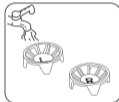

从清洗机中取出清洗篮，可放流水中冲洗。  
将干净的清洗篮放回清洗机中。将产品置于干燥的地方保存。

## 郑重声明

本公司产品不断改进，设计与规格如有变更，恕不另行通知。

本说明书上所有资料经过仔细校对，力求准确无误，如有任何印刷错漏，本公司保留解释权。

本说明书版权属深圳市洁盟清洁技术有限公司所有，未经书面授权，严禁翻版或转载，违者本公司将追究其法律责任。

本手册上所涉及的图片仅供参考，请以产品实物为准。



使用说明请扫码

## 深圳市洁盟清洁技术有限公司

Skymen Cleaning Technology Shenzhen Co.,LTD

工厂地址：深圳市光明新区公明街道李松荫第一工业区110号F12栋

营销中心：深圳市宝安区福永街道福海信息港A1栋3楼

电 话：0755-29784256

传 真：0755-29784236

邮 箱：skymen@skymen.cc

网 址：www.skymen.cn www.skymen.vip www.skymen.com.cn

全国统一服务热线：400-878-5188